

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für HdO Hörgeräte mit Ohrpasstücken:

Wir empfehlen die Reinigung der Schläuche zwei Mal pro Woche zum Schutz vor Entzündungen und vor Verstopfung durch Ohrenschmalz

Reinigung der Ohrpasstücke

1. Ohrpasstück am Schlauch vom Hörgerät trennen und auf das Sieb der Reinigungsdose legen.
2. Reinigungskonzentrat in die Reinigungsdose füllen bis der Boden bedeckt ist.
3. Das Sieb mit den Ohrpasstücken in die Reinigungsdose einsetzen und mit Leitungswasser auffüllen - bis die Ohrpasstücke komplett bedeckt sind. Die Dose verschließen und die Ohrpasstücke über Nacht einweichen.
4. Ohrpasstücke entnehmen, mit Leitungswasser abspülen und mit einem Papiertaschentuch trocknen. Den Puster auf den Schlauch stecken und kräftig durchpusten bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist. Hörgerät wieder auf den Schlauch des Ohrpasstückes stecken, dabei auf rechts (rot) und links (blau) achten.

Dank des Reinigungskonzentrates kann das Reinigungsbad bis zu vier Mal verwendet werden.

Wir empfehlen die Hörgeräte jeden Abend, zum Schutz vor Korrosionsschäden durch Schweiß und Feuchtigkeit, zu trocknen

Trocknen der Geräte mit der elektrischen Trockenbox

Die Batterie (wenn möglich) aus dem Hörgerät entnehmen und mit geöffneter Batteriekappe in die elektrische Trockenbox legen. Den Deckel verschließen und den Schalter an der Trockenbox betätigen, jetzt leuchtet ein blaues Licht auf.

Zum Trocknen erwärmt sich die Trockenbox vollautomatisch auf ca. 50⁰ (das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet), nach ca. zwei Stunden schaltet sich die Trockenbox selbstständig wieder aus.

Trocknen der Geräte mit Trockenkapseln

Hörgeräte mit einer Trockenkapsel in die Trockendose legen und den Deckel fest verschließen.

Die Geräte müssen acht Stunden, am besten über Nacht trocknen. Eine verbrauchte Kapsel erkennt man an dem fast weißlichen Farbton (Grundfarbe: gelblich). Eine Kapsel hält etwa vier Wochen.

Die Trockendose mit der Kapsel muss auch tagsüber fest verschlossen sein, da die Kapsel sonst schneller aufgebraucht ist.

Die Hörgeräte und Ohrpasstücke können zusammen getrocknet werden. Eine regelmäßige und korrekte Reinigung Ihrer Hörgeräte beugt Reparaturen vor und verlängert die Lebensdauer.