

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für HdO Hörgeräte mit Slimschlauch:

Wir empfehlen die Reinigung der Schläuche zwei Mal pro Woche zum Schutz vor Entzündungen und Verstopfung durch Ohrenschmalz

Reinigung der Slimschläuche

1. Slimschläuche von dem/den Hörgerät/en trennen (wir beraten Sie gerne individuell in unseren Filialen Bad Soden oder Königstein) und auf das Sieb der Reinigungsdose legen.
2. Reinigungskonzentrat in die Reinigungsdose füllen bis der Boden bedeckt ist.
3. Das Sieb mit den Slimschläuchen in die Reinigungsdose einlegen und mit Leitungswasser auffüllen, bis die Slimschläuche komplett bedeckt sind. Die Dose verschließen und die Schläuche über Nacht einweichen.
4. Slimschläuche entnehmen, mit Leitungswasser abspülen und mit einem Papiertaschentuch trocknen. Den Puster auf den Schlauch stecken und kräftig durchpusten bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist. Hörgeräte wieder auf den Slimschlauch stecken, dabei auf rechts (rot) und links (blau) achten.

Dank des Reinigungskonzentrates kann das Reinigungsbad bis zu vier Mal verwendet werden.

Wir empfehlen die Hörgeräte jeden Abend, zum Schutz vor Korrosionsschäden durch Schweiß und Feuchtigkeit, zu trocknen

Trocknen der Geräte mit der elektrischen Trockenbox

Die Batterie (wenn möglich) aus dem Hörgerät entnehmen und mit geöffneter Batteriekappe in die elektrische Trockenbox legen. Den Deckel verschließen und den Schalter an der Trockenbox betätigen, jetzt leuchtet ein blaues Licht auf.

Zum Trocknen erwärmt sich die Trockenbox vollautomatisch auf ca. 50⁰ (das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet), nach ca. zwei Stunden schaltet sich die Trockenbox selbstständig wieder aus.

Trocknen der Geräte mit Trockenkapseln

Hörgeräte mit einer Trockenkapsel in die Trockendose legen und den Deckel fest verschließen.

Die Geräte müssen acht Stunden, am besten über Nacht trocknen. Eine verbrauchte Kapsel erkennt man an dem fast weißlichen Farbton (Grundfarbe: gelblich). Eine Kapsel hält etwa vier Wochen.

Die Trockendose mit der Kapsel muss auch tagsüber fest verschlossen sein, da die Kapsel sonst schneller aufgebraucht ist.

Die Hörgeräte und Slimschläuche können zusammen getrocknet werden.

Eine regelmäßige und korrekte Reinigung Ihrer Hörgeräte beugt Reparaturen vor und verlängert die Lebensdauer.