

Reinigungs- und Pflegeempfehlung IdO Hörgeräte:

Wir empfehlen die tägliche Reinigung der Hörgeräte zum Schutz vor Entzündungen und vor Verstopfung durch Ohrenschmalz

Reinigung der Hörgeräte

Hörgerät mit einem Reinigungstuch sorgfältig sauber wischen. Die Außenseite mit dem/den Mikrofon/en darf nicht gereinigt werden (dies übernehmen wir gerne für Sie). Über das Säubern der Zusatzbohrung und Wechseln des Filtersystems an Ihrem Hörgerät beraten wir Sie gerne individuell in unseren Filialen Bad Soden oder Königstein, da die Filtersysteme variieren können.

Wir empfehlen die Hörgeräte jeden Abend, zum Schutz vor Korrosionsschäden durch Schweiß und Feuchtigkeit, zu trocknen

Trocknen der Geräte mit der elektrischen Trockenbox

Die Batterie (wenn möglich) aus dem Hörgerät entnehmen und mit geöffneter Batteriekappe in die elektrische Trockenbox legen. Den Deckel verschließen und den Schalter an der Trockenbox betätigen, jetzt leuchtet ein blaues Licht auf.

Zum Trocknen erwärmt sich die Trockenbox vollautomatisch auf ca. 50⁰ (das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet), nach ca. zwei Stunden schaltet sich die Trockenbox selbstständig wieder aus.

Trocknen der Geräte mit Trockenkapseln

Hörgeräte mit einer Trockenkapsel in die Trockendose legen und den Deckel fest verschließen.

Die Geräte müssen acht Stunden, am besten über Nacht trocknen. Eine verbrauchte Kapsel erkennt man an dem fast weißlichen Farbton (Grundfarbe: gelblich). Eine Kapsel hält etwa vier Wochen.

Die Trockendose mit der Kapsel muss auch tagsüber fest verschlossen sein, da die Kapsel sonst schneller aufgebraucht ist.

Eine regelmäßige und korrekte Reinigung Ihrer Hörgeräte beugt Reparaturen vor und verlängert die Lebensdauer.